

Les gestes à faire

Avant l'utilisation

- Vérifier que l'emballage a été correctement assemblé.
- Stocker l'emballage sur une surface plane, rigide et sèche, à l'écart de toute source de chaleur, dans un endroit ventilé et hors de la portée des enfants.

Pendant l'utilisation


- Ne jamais re-capuchonner une aiguille.
- Ne jamais forcer pour introduire les déchets.
- Ne jamais introduire la main dans l'emballage pour faciliter le passage des déchets.
- Vérifier visuellement si les déchets antérieurs sont complètement tombés.
- Introduire les aiguilles et autres en engageant le côté piquant en premier.
- Respecter le niveau de remplissage.
- Ne verrouiller la boîte qu'après son remplissage complet ou à la fin de son utilisation.

Après l'utilisation


- L'emballage est plein lorsque la limite de remplissage est atteinte.
- Activer la fermeture définitive de la boîte.
- Ne jamais tenter de ré-ouvrir un emballage fermé définitivement.

Déchets piquants coupants tranchants :

Aiguilles, lancettes, lames, scalpels...

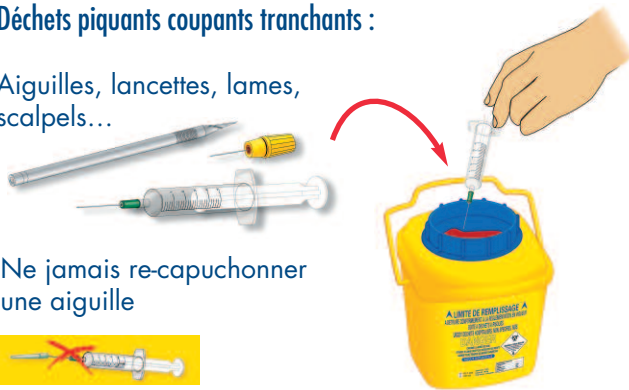

Ne jamais re-capuchonner une aiguille

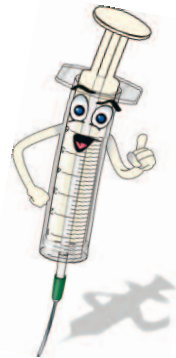

Un doute ? Une question ?

Demandez conseil à votre pharmacien
ou joignez l'expert DASRI au numéro :

N° Indigo 0 820 20 72 40

0,12 € TTC / MN

PRP 15-0709/1 - 07/09  Healthworld

Patients en auto-traitement

PHARMA COLLECT®

Centre d'Entreposage pour Déchets d'Activités de Soins à Risques Infectieuses et Anesthésiques

La solution pour éliminer vos DASRI
(Déchets d'Activités de Soins à Risques Infectieux)

Protégez votre santé et celle des autres, tout en protégeant l'environnement !



Sandoz,
une démarche environnementale,
aux côtés de votre pharmacien.

SANDOZ
RÉALISONS LA
SANTÉ
DURABLE

a Novartis company

* Une saine décision

 **SANDOZ**

A healthy decision®



Papier certifié FSC (Forest Stewardship Council)

Élimination des DASRI : une solution qui préserve notre environnement et qui protège notre santé à tous !

Une solution pour éliminer vos Déchets d'Activités de Soins à Risques Infectieux

Certaines personnes sont amenées à pratiquer régulièrement des auto-injections dans le cadre du traitement d'affections particulières (diabète par exemple). Les éléments usagés résultant des soins ou des tests d'auto-surveillance peuvent présenter des risques pour le patient, son entourage, les agents responsables de la collecte des ordures ménagères ou pour tout usager de la voie publique, s'ils sont mélangés aux déchets ménagers classiques, ou abandonnés.

Pour vous aider, Sandoz et votre pharmacien mettent en place un dispositif pour vous permettre d'éliminer vos Déchets d'Activités de Soins à Risques Infectieux (DASRI) en sécurité, conformément à la législation.

PHARMA COLLECT® est une borne automatisée spécialement conçue pour équiper les pharmacies d'officine.

Dans un seul et même endroit, vous pourrez désormais déposer votre boîte à aiguilles dans la borne, puis acheter votre traitement et recevoir un nouvel emballage accompagné de son code à barres auprès de votre pharmacien.

Ne jetez pas vos DASRI dans les ordures ménagères mais utilisez les contenants réglementaires

Les DASRI peuvent avoir une influence négative sur l'environnement si nous n'y prêtons pas attention! C'est pourquoi, dans une vision citoyenne de son activité de laboratoire pharmaceutique, Sandoz, expert en médicaments génériques et biosimilaires, s'engage dans la voie de la santé durable, pour que nous puissions tous bénéficier d'un environnement favorable.



Sandoz et votre pharmacien mettent donc à votre disposition un service gratuit vous permettant de collecter en toute sécurité les produits résultant de vos activités de soins à la maison, grâce à la mise à disposition de boîtes à aiguilles.

Déposez-les ensuite au sein de la borne PHARMA COLLECT® accessible pendant les horaires d'ouverture de votre pharmacie.

La marche à suivre

- 1- Retirez gratuitement votre boîte à aiguilles jaune munie d'un code à barres, dans l'une des pharmacies partenaires, en même temps que votre traitement.
- 2- Déposez les éléments usagés liés à vos soins (aiguilles, lancettes, seringues, ...) dans votre boîte. Ne la conservez pas plus de trois mois.
- 3- Faites votre dépôt dans la borne PHARMA COLLECT®, à la pharmacie :

Identifiez votre boîte
en apposant le code à barres
contre le lecteur.



Le buzzer sonne.
Ouvrez la trappe,
puis faites votre dépôt.



Refermez la trappe.

